

NATALIS™
Żel położniczy

 SWISS QUALITY
PREMIUM PRODUCT

KONCEPCJA NATURALNEGO PORODU



5 lat na rynku



NATALIS™
Żel położniczy

ułatwia przebieg i skraca czas trwania porodu

NATALIS™

Żel położniczy



Żel położniczy Natalis® 1 - wyrób medyczny wspomagający poród naturalny.

Aplikacja wyłącznie przez wykwalifikowany personel położniczy.

Przed użyciem żelu położniczego Natalis® 1 należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję używania.

Postać farmaceutyczna:

Żel położniczy Natalis® 1

1 sterylna strzykawka jednorazowa, zawierająca 15 ml żelu położniczego, oddzielne opakowanie sterylne z aplikatorem dopochwowym.

Właściwości, forma galenowa oraz skład preparatu:

Żel położniczy Natalis® 1 jest preparatem sterylnym, w opakowaniu jednorazowym.

Żel położniczy Natalis® 1 nie zawiera żadnych substancji czynnych.

Żel położniczy Natalis® 1 jest bezzapachowym i prawie bezbarwnym żelem, zawierającym wyłącznie składniki naturalne.

Cechy charakterystyczne żelu to duża lepkość, izotoniczność, lekko kwaśny odczyn pH rzędu 6,0-6,7 oraz przewodność elektryczna 6,0-8,0 mS·cm⁻¹.

Szczególne właściwości:

Żel położniczy Natalis® 1 zwiększa naturalne nawilżenie podczas pierwszej fazy (etap wczesny i aktywny) oraz drugiej fazy (etap skurczów partych) porodu naturalnego.

Skład:

hydroksyetyloceluloza, glicerol, guma ksantanowa, chlorek sodu, glikol propylenowy, woda.

Wskazania do stosowania żelu położniczego Natalis® 1:

Żel położniczy Natalis® 1 został opracowany w celu ułatwienia porodu naturalnego. Żel położniczy Natalis® 1 jest stosowany podczas porodu naturalnego w celu ułatwienia jego przebiegu zarówno matce, jak i dziecku oraz w celu ochrony dna miednicy. Żel położniczy Natalis® 1 tworzy warstwę poślizgową w kanale rodny, zmniejszając tarcie płodu o ściany kanału rodnego. Żel położniczy Natalis® 1 jest sterylny, hipoalergiczny, przewodzi prąd elektryczny, ma lekko kwaśny odczyn, jest izotoniczny i kompatybilny z błonami śluzowymi. Żel położniczy Natalis® 1 może być stosowany zarówno u pierworódek, jak i u wieloródek, a także w stanach po cięciu cesarskim i w przypadku zabiegowego bądź chirurgicznego zakończenia porodu. Żel położniczy Natalis® 1 ułatwia przebieg i skraca czas trwania porodu, a także chroni płód oraz pochwę, dno miednicy i narządy rodne matki.

Szczególne wskazania do stosowania żelu położniczego Natalis® 1:

- ułatwienie porodu naturalnego w celu ochrony matki i dziecka przez zmniejszenie niepożądanego tarcia zarówno u pierworódek, jak i wieloródek, w stanach po cięciu cesarskim, w przypadku porodów w wodzie, porodu przedwczesnego, a także pęknięcia błon porodowych;
- łagodzenie skutków porodu przedłużonego;
- ułatwienie zabiegów chirurgicznych wykonywanych podczas porodu;
- ochrona narządów rodnych podczas porodu naturalnego;
- ułatwienie ręcznego oddzielenia łożyska.


Specjalne zalecenie dotyczące stosowania żelu położniczego Natalis® 1:

- stosować w celu ułatwienia porodu i ręcznego oddzielenia łożyska.

Droga i sposób podawania:

Żel położniczy Natalis® 1 jest podawany podczas badania ginekologicznego w trakcie pierwszego etapu porodu. Cała zawartość strzykawki podawana jest do pochwy (kanału rodnego) począwszy od zakończenia szyjki macicy, przy użyciu elastycznego aplikatora dopochwowego lub ręcznie. Możliwe jest uzupełnienie tak powstałej warstwy poślizgowej dodatkowym płynem, w celu uzyskania pełnego pokrycia ścian kanału rodnego. Można w tym celu zastosować roztwór NaCl lub inny roztwór aseptyczny. Żel położniczy Natalis® 1 skraca czas trwania porodu, dlatego powinien być stosowany podczas całego porodu. Przeciętnie stosowana dawka to 15-30 ml żelu Natalis® 1 na poród. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, maksymalna dawka żelu położniczego Natalis® 1 wynosi 30 ml. Aplikacja wyłącznie przez wykwalifikowany personel położniczy.

Żel położniczy NATALIS™

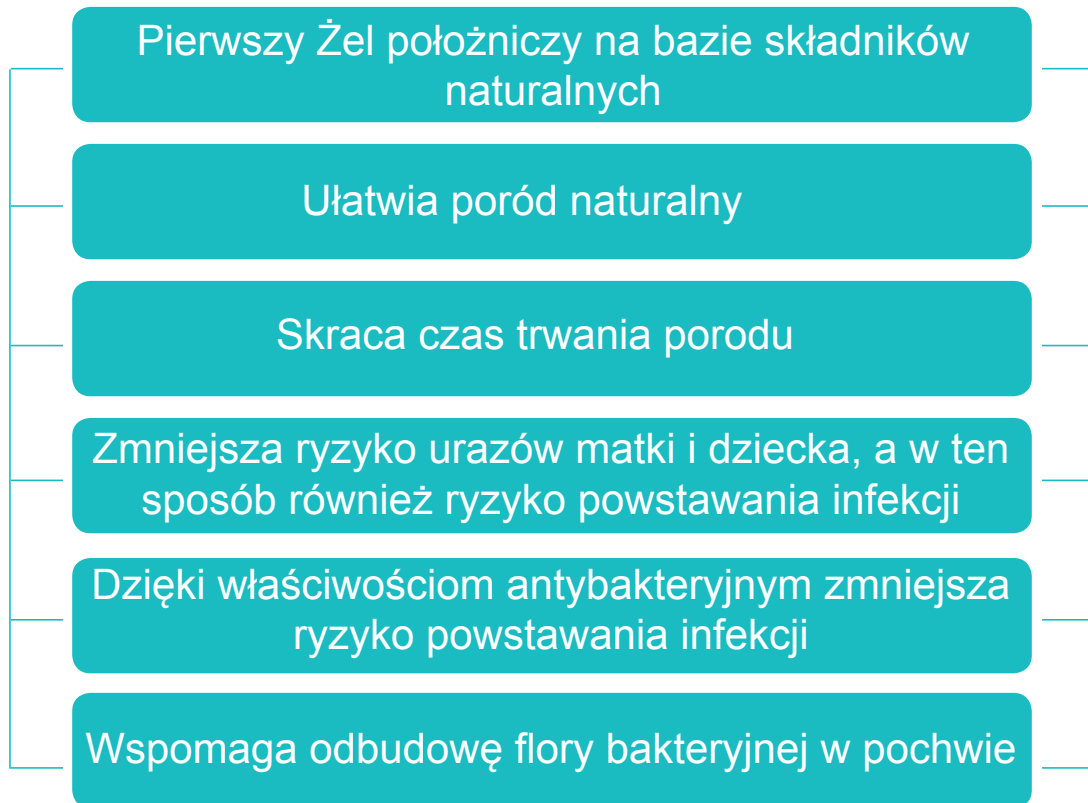

Sposób podawania: miejscowo, do kanału rodnego.

Środki ostrożności:

Po otwarciu sterylnego opakowania, do strzykawki należy podłączyć sterylny aplikator dopochwowy. Przygotowanie i aplikacja powinny następować w warunkach sterylnych. Po ukazaniu się główki dziecka należy przetrzeć jego oczy, nos i twarz suchą ściereczką. W razie konieczności należy wykonać udrożnienie jamy ustnej i nosa noworodka. Personel położniczy winien chwytać dziecko przez suchą ściereczkę, aby noworodek nie wyslizgnął się z rąk. W związku z faktem, że żel położniczy Natalis® 1 przewodzi prąd elektryczny, po jego aplikacji możliwe jest wykonywanie zabiegów elektrochirurgicznych w celu tamowania krwawień, na przykład podczas cięcia cesarskiego lub kontroli stanu tkanek kanału rodnego. W celu wykonania tego typu zabiegów nie jest więc konieczne stosowanie dodatkowych żeli przewodzących prąd elektryczny.

Biozgodność i stosowanie w okresie ciąży:

Brak informacji o jakimkolwiek niekorzystnym wpływie preparatu na zdrowie matki bądź noworodka.

Działania niepożądane: Dotychczas nie odnotowano żadnych przypadków wystąpienia działań niepożądanych.

Interakcje: Dotychczas nie odnotowano żadnych przypadków wystąpienia interakcji.

Przeciwwskazania:

Żelu położniczego Natalis® 1 nie należy stosować w przypadku:

- podejrzenia zakażenia płynu owodniowego,
- objawów niedotlenienia płodu,
- znanej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu,
- przeciwwskazań do porodu naturalnego.

Warunki przechowywania i data przydatności do użycia:

Żel położniczy Natalis® 1 należy przechowywać w temperaturze pokojowej i chronić przed światłem.

Data przydatności do użycia jest wydrukowana na opakowaniu bezpośrednim i na opakowaniu zewnętrznym.

Żelu położniczego Natalis® 1 nie należy stosować po upływie daty przydatności do użycia.

Ostatnia aktualizacja instrukcji używania: czerwiec 2011

Oznakowanie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej: CE 1253

Wytwórca: HTrade (Switzerland) GmbH CH-8048 Zurych

Wyłączny Dystrybutor:

Avrix Pharma sp. z o.o.

www.avrixpharma.pl



infolinia: tel. **887 118 118**

zamówienia: tel. **887 119 119**


www.natalispolska.pl

NATALIS™

Żel położniczy



SWISS QUALITY
PREMIUM PRODUCT

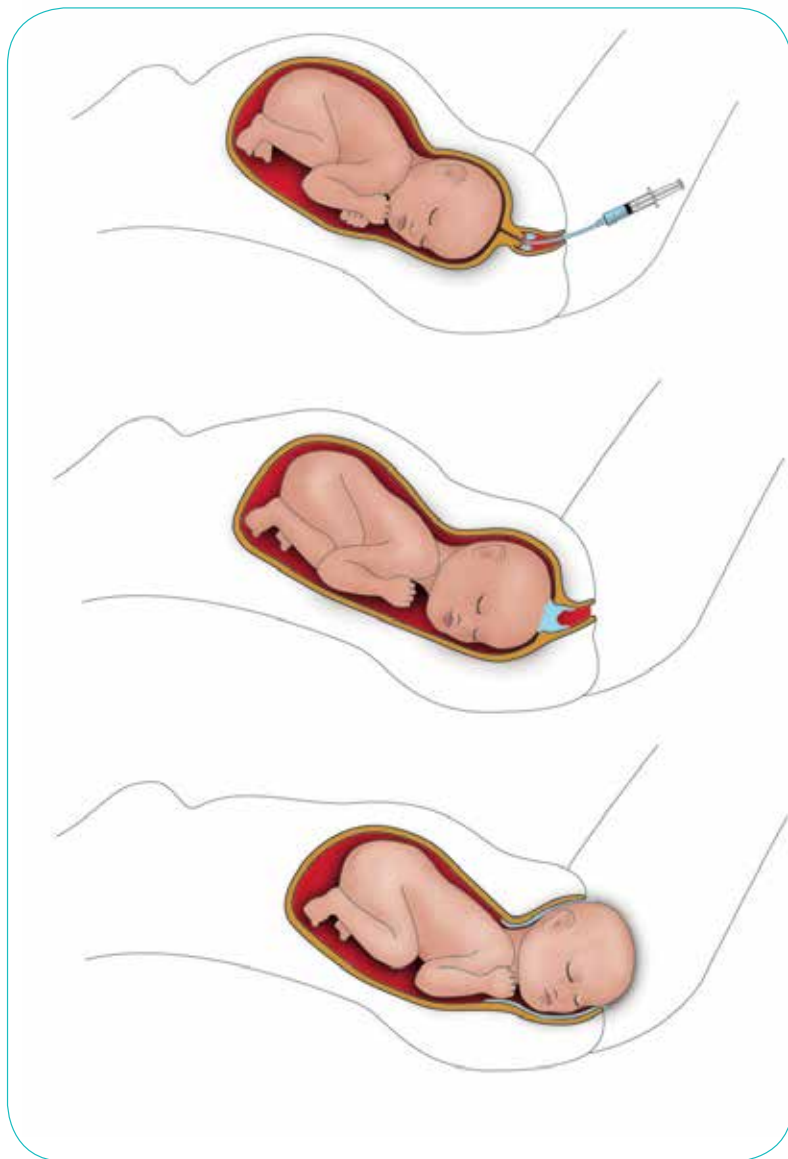

W początkowej fazie porodu lekarz lub położna nakładają żel poniżej szyjki macicy za pomocą miękkiego aplikatora dopochwowego.

Skład preparatu: W 1 sterylnej strzykawce jednorazowej, zawierającej 15 ml żelu położniczego, znajdują się następujące składniki: hydroksyetyloceluloza, glikol propylenowy, gliceryna, guma ksantanowa, chlorek sodu, woda oczyszczona.

Wskazówki dotyczące stosowania: Żel położniczy Natalis jest produktem sterylnym i w początkowej fazie porodu lekarz lub położna nakładają go poniżej szyjki macicy za pomocą miękkiego aplikatora dopochwowego. Żel natychmiast tworzy warstwę poślizgową na ściankach kanału rodnego. Działanie produktu jest wyłącznie fizyczne; nie zawiera on żadnych substancji czynnych ani składników hormonalnych. W trakcie porodu należy również masować narządy rodne.

Wielkość opakowania, pojemność

www.natalispolska.pl

www.szkojarodzenianamedal.pl

(znajdziesz tutaj katalog szkół rodzenia NATALIS oraz listę APTEK)

NATALIS™

Żel położniczy

5 lat na rynku



SWISS QUALITY
PREMIUM PRODUCT

avrix
PHARMA



infolinia: tel. **887 118 118**
zamówienia: tel. **887 119 119**

www.natalispolska.pl

(znajdziesz tutaj katalog szkół rodzenia NATALIS oraz listę APTEK)